

## 飛沫飛散防止間仕切り Safety Booth

セーフティ・ブース

オプション：屋根 取替パーツ：窓/手袋

	シート	手袋
サイズ (mm)	レギュラータイプ 980×780 スタンディングタイプ 830×780	全長：780
本体質量 (g)	190	300
材質	PVC	天然ゴム

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、本書をよくお読みいただき正しく組み立ておよびお取り扱いください。また、本書はいつでも取り出せるように大切に保管してください。

### ご使用上の注意

- ・天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理および改造による事故、破損に関しては保証致しかねます。
- ・臨時の屋外検査等を想定した簡易的なブースに使用するパーツです。本来の目的以外の用途には使用しないでください。
- ・手袋および窓部分のシートは消耗品です。破損や剥がれが生じた際は、弊社のお取り替え用商品をご使用ください。
- ・火や暖房器具の近くで使用しないでください。加熱により変形、変色、破損のおそれがあります。
- ・炎天下や直射日光のあたるところでの長時間の使用は避けてください。変形、変色、破損のおそれがあります。
- ・氷点下での使用は避けてください。変形、破損のおそれがあります。
- ・落下等の衝撃を与えないでください。変形、破損のおそれがあります。
- ・手袋は天然ゴムです。アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、適切な措置を施してください。
- ・手袋で高濃度の薬品や溶剤には触れないでください。


### 取付方法

#### 窓



**1** 製品本体から透明なシートをゆっくりはがします。

**2** 「窓シート」の両面テープの剥離紙を少しずつはがしながら、切り込みに合わせて貼ります。

#### 内容物

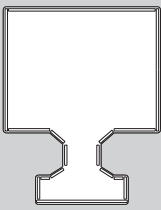


・窓シート 1枚

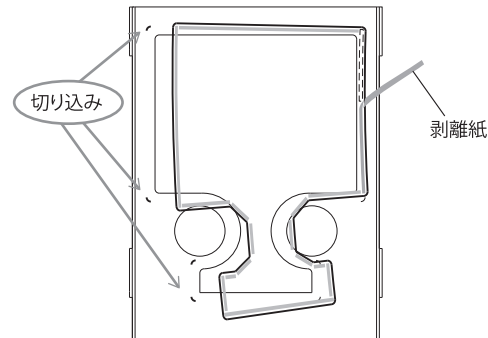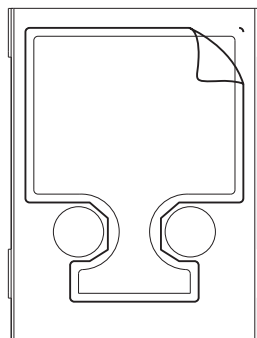

#### 手袋

■ 製品本体から既存の手袋を取り外します。新しい手袋の口を折り返すようにして、製品本体（水色の突起部分）にひっかけて取り付けてください。

#### 内容物

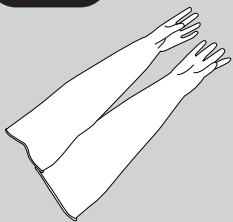

・手袋 1双



製造元・お問い合わせ先



サクラパックス株式会社

R&Dセンター事業開発部 〒930-0106 富山県富山市高木 3000 番地 Tel : 076-436-6194

Email : itemplan@sakura-paxx.co.jp